

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 08 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Manuseio da autoclave Executante: Enfermeiro e técnico de enfermagem. Frequência: Semanalmente		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado: Manusear as autoclaves com segurança propiciando seu bom funcionamento.
Recursos Necessários: 1. Autoclave; 2. Cestos; 3. Copo medidor.
Atividades: 1. Higienizar as mãos; 2. Efetue a limpeza da guarnição da porta e da base da câmara com álcool 70%; 3. Conecte a autoclave em uma tomada elétrica compatível; 4. Insira água destilada diretamente na câmara interna utilizando o caneco de medida que acompanha o equipamento; 5. Verifique como está embalado o material; 6. Verifique a tabela de referência padrão para esterilização; 7. Coloque o material a ser esterilizado na câmara, não remova as prateleiras e a chapa de proteção da resistência (o material deve ter dimensões compatíveis com a capacidade de armazenamento das prateleiras); 8. Feche a porta corretamente; 9. Posicione a mangueira de saída de condensado em um reservatório de coleta ou no esgoto; 10. Ligue a chave geral que se posiciona na parte traseira da autoclave; 11. Verifique se a pressão indicada no manômetro esta zero; 12. Selecione através da tecla seleção o ciclo desejado; 13. Pressione a tecla de partida, o ciclo selecionado transcorrerá automaticamente; 14. Observar se o ciclo está transcorrendo corretamente; 15. Se a autoclave apresentar algum bip de alarme durante o ciclo verifique a tabela de indicação dos tipos de alarme; 16. Após a finalização do ciclo, destrave a porta e a mantenha entre aberta por cinco minutos; 17. Retire o material; 18. Observe se o material foi esterilizado adequadamente; 19. Encaminhe o material para o setor; 20. Recolher material; 21. Deixar ambiente limpo e organizado; 22. Higienizar as mãos.
Cuidados Especiais: 1. Antes de iniciar qualquer ciclo checar os parâmetros de esterilização e secagem. 2. Antes de ligar a autoclave observe o manômetro do nível de água.
Referências Bibliográficas: Manual de instrução do equipamento.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Data e assinaturas:

